

# Accu-Chek® Combo rendszer tájékoztató

Az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa patronjának cseréje



1 Távolítsa el a patron.  
Óvatosan csavarja ki.  
Csak akkor húzza ki a patron, ha már teljesen ki van csavarva. A pumpát nyílással lefelé tartsa!



2 Vegye le a feltöltött patron védőkupakját.  
(Ne érjen a patron hegyéhez).



3 Nyomja rá teljesen az adaptert a patron hegyére, ütközésig.



4 Csomagolja ki a már előkészített új Accu-Chek infúziós készletet a mellékelt használati útmutató alapján.




5 Csavarja be az infúziós készlet luer-záras csatlakozóját az adapterbe, az óramutató járásával megegyező irányban.



6 Nyomja meg a menü gombot a patroncsere képernyő megjelenítéséhez. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.



7 Győződjön meg róla, hogy az infúziós készlet le van választva, és a patron el van távolítva. Nyomja meg, és tartsa lenyomva az OK gombot 3 másodpercig, a hangjelzés megszólalásáig.

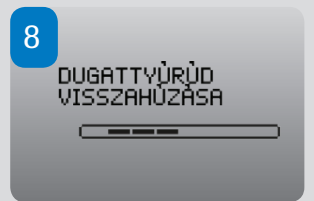

8 A dugattyúrúd elkezd visszahúzódní. A dugattyúrúdat ne érintse meg, illetve ne zavarja meg más módon a visszahúzódnás folyamatát, mivel ez az inzulinpumpa károsodását okozhatja.




9 Ha a dugattyúrúd teljesen visszahúzódnott, akkor a képernyőn megjelenik a maximális patron úrtartalom: 315 U (egység).



10 Tartsa függőlegesen az inzulinpumpát. Tartsa úgy az új, feltöltött patron, hogy a csatlakoztatott adapter és az infúziós készlet egymással párhuzamosan, felfelé álljon, és közel legyen a patronrekeszhez.



11 Ügyeljen rá, hogy az adapter menetes részének felső széle egy szintben legyen a patronrekesz tetejével.

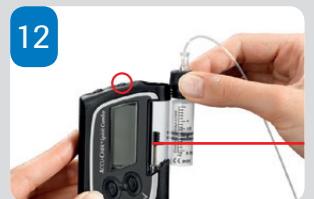

12 Nyomja a LE (▼) gombot addig, amíg a dugattyúrúd egy szintben ér a dugattyú aljával.



Tartsa az inzulinpompát ferdén lefelé (úgy, hogy az adapter lefelé nézzen). Helyezze be a patronát a patronrekeszbe.



Csavarja (ne nyomja) az adaptert az óramutató járásával megegyező irányban, amíg az megfelelően nem illeszkedik a patronrekeszhez.




A patron akkor van megfelelően behelyezve, ha a dugattyúrúd véglemeze megfelelően illeszkedik a dugattyúhoz.



Ha a dugattyúrúd véglemeze nincs egy szintben a patron dugattyújával, vegye ki a patronát a rekeszből és ismételje meg a 10-14 lépéseket.



Ellenőrizze, hogy az infúziós szerelék luer-zárás csatlakozója továbbra is megfelelően csatlakozik-e az adapterhez. Kézzel szorítsa rá az infúziós készletet az óramutató járásával megegyezően, amíg az stabilan nem rögzül az adapterben.

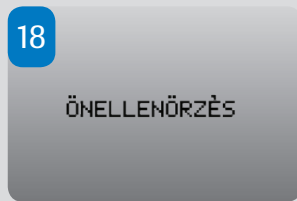

A patron megfelelő behelyezése után nyomja meg az OK gombot. Az inzulinpumpa önellenőrzést végez.



Az önellenőrzés végén megjelenik az infúziós készlet feltöltése képernyő. Az infúziós készlet feltöltése a vezeték inzulinvaló feltöltését és a légbuborékok eltávolítását jelenti. Kérjük, folytassa ezzel a művelettel a használati útmutatóban található lépéseknek megfelelően.

## A nem megfelelő használat az inzulinpumpa károsodásához vezethet.



NE helyezze be a patronát az inzulinpumpába az infúziós készlet vezetékének csatlakoztatása nélkül. Ez az inzulin inzulinpumpába kerülését okozhatja. Amennyiben az inzulinpumpába inzulin kerül, idővel a dugattyúrúd károsodását okozhatja és potenciálisan korlátozhatja, vagy megakadályozhatja az inzulinpumpa működését.



NE tartsa az inzulinpompát függőlegesen a patron behelyezésekor és kivételekor. Ez az inzulin inzulinpumpába kerüléséhez és a dugattyúrúd mozgásának akadályozásához vezethet.

