



DKP

Roche

KOMPLEX MEGOLDÁS A DIABÉTESZ MONITOROZÁSÁRA!

Új funkciókkal bővült a Diabétesz
Kontroll Program® (DKP) applikáció!

- Automatikus **adatátvitel**
Accu-Chek Instant
vércukormérőből
- **Vércukorérték-, inzulin- és**
szénhidrátbevitel digitális
naplózása
- Valamennyi adat **grafikonos**
ábrázolása
- **7, 14, 30 és 90 napos** átlag
vércukormérési eredmények
megjelenítése
- **Vércukoradatok**
megosztása különböző
üzenetküldő alkalmazásokkal
- **Érdekes tartalmak/cikkek és receptek** cukorbetegeknek,
valamint egészségtudatos életmódot folytatók számára
- **Folyamatos kedvezmények** a regisztrált tagoknak
- Gyógyszer, recept, szűrővizsgálat és inzulin beadási
emlékeztetők
- **Ingyen letölthető** iOS és Android platformokon



**FRISSÍTSE AZ ALKALMAZÁST
MOBILTELEFONJÁN, ÉS HASZNÁLJA AZ ÚJ
FUNKCIÓK NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKET!**



Letölthető az

App Store-ból



SZEREZD MEG:

Google Play

ACCUCHEK®

A DKP APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA ACCU-CHEK INSTANT VÉRCUKORMÉRŐVEL



1. **Töltse le** a DKP applikációt okostelefonjára (Android vagy iOS platformon); nyissa meg az alkalmazást, **majd regisztráljon!**
2. **Kapcsolja be a Bluetooth® kapcsolatot** mobiltelefonján!
3. A vércukormérő kikapcsolt állapotában, **nyomja meg és tartsa nyomva a vércukormérő be-/kikapcsoló gombját**, amíg a Bluetooth® szimbólum meg nem jelenik.
4. Indítsa el a DKP alkalmazást, majd a felugró ablakban **engedélyezze az Accu-Chek Instant készülékkel való szinkronizációt és adja meg** a vércukormérő hátoldalán található **PIN kódot!**
5. Amennyiben a párosítás sikeres volt, a vércukormérő képernyőjén megjelenik az OK felirat.
6. Az Accu-Chek Instant vércukormérő által **mért vércukorértékek automatikusan beolvasásra kerülnek** a DKP alkalmazásba.

Webshop és bővebb információ:
www.vercukormeres.hu


Az Accu-Chek® Instant készülék gyógyászati segédeszköz.

Az Accu-Chek®, Accu-Chek® Instant a Roche bejegyzett védjegyei © 2016 Roche.

A Diabétesz Kontroll Program® a Roche Magyarország Kft. bejegyzett védjegye. © 2013 Roche

Roche Magyarország Kft.

2040 Budaörs, Edison u. 1.

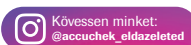

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségével kapcsolatban további információkat a www.vercukormeres.hu oldalon talál.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!