

## Tisztelt Accu-Chek® Smart Pix használó!

Amennyiben Ön azt tapasztalta, hogy az Accu-Chek® Smart Pix leolvasó eszköz jelenleg nem kompatibilis a leolvasni kívánt Accu-Chek® inzulinpumpával, vagy Accu-Chek® vércukormérővel, kérjük, frissítse leolvasó eszközének szoftverét a honlapunkon található **“SIUpdate\_V3\_05\_01.slu”** megnevezésű frissítő szoftverre, az alábbiak szerint.

Miután csatlakoztatja az Accu-Chek® Smart Pix leolvasó eszközt a számítógéphez, a **“slu”** kiterjesztésű fájlt másolja át a leolvasó eszközt jelentő meghajtóra.

Részletesen:

1. Amint az Accu-Chek® Smart Pix csatlakozik a számítógéphez, a **“Sajátgép”/“Computer”** alatt megjelenik egy új meghajtó, ami a leolvasó eszközt jelenti.
2. Ha ez megtörtént, a **“slu”** kiterjesztésű fájlra jobb egérgombbal kattintson, majd a megjelenő menüben kattintson a **“Másolás”/“Copy”** parancsra.
3. Ezután nyissa meg azt a meghajtót, ami az Accu-Chek® Smart Pix leolvasó eszközt jelenti.
4. A meghajtó megnyitása után jobb egérgombbal kattintson bele, majd a megjelenő menüben kattintson a **“Beillesztés”/“Paste”** parancsra.

Miután átmásolta az új szoftvert, a számítógépen látszólag nem történik semmi, viszont az Accu-Chek® Smart Pix leolvasó eszközön a kék kijelző különböző formákban villogni fog, kb. 20 mp-ig. Amint ennek vége és ismét csak a két szokásos led (felül 1 és alul középen 1) villog, a frissítés megtörtént.

Ezután csatlakoztatható a leolvasni kívánt Accu-Chek® eszköz.

Köszönjük!

Roche Diabétesz Üzletág