

TISZTELT ACCU-CHEK® PUMPAHASZNÁLÓ!

A telefonos/online egészségügyi távkonzultációk bevezetésével, a kezelőorvosával történő hatékonyabb együttműködés érdekében kérjük, hogy **használja az Accu-Chek inzulinpumpájához kapott Accu-Chek Smart Pix adatleolvasó készüléket**, amelynek segítségével az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa és az inzulinpumpához kapcsolódó Accu-Chek Performa Combo vércukormérő adatai könnyen és gyorsan letölthetők és megjeleníthetők.

A letöltött adatokat ezután **elektronikusan megoszthatja orvosával az Accu-Chek Connect Online Diabétesz Menedzsment program segítségével** (www.accu-chekconnect.com), majd vércukorértékeiről és anyagcseréjéről online is konzultálhat kezelőorvosával.

CUKORBETEGSÉGE GONDOZÁSÁT KÖNNYÍTHETI MEG AZ ADATLETÖLTÉSSEL ÉS A KEZELŐORVOSÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADATMEGOSZTÁSSAL:

- Vércukoradatai **könnyebben értékelhetők**, segítségével gyorsan felismerhetők a kóros trendek
- **Távrolról is hozzáférhet vércukor adataihoz**, bármely internetkapcsolattal rendelkező számítógép/laptop, vagy mobiltelefon segítségével
- Információt oszthat meg kezelőorvosával, így adatai **orvosa számára is bármikor hozzáférhetővé válnak**
- Tiszta képet nyújt kezelőorvosa számára, így a **kezelés az Ön igényeire szabható**

AZ ACCU-CHEK CONNECT ONLINE PROGRAMBA TÖRTÉNŐ ADATÁTVITEL:

Az **Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa** és az inzulinpumpához kapcsolódó **Accu-Chek Performa Combo vércukormérő**, valamint az **Accu-Chek Performa vércukormérő** esetében van szükség az **Accu-Chek Smart Pix adaleolvasó készülék** használatára vércukoradatainak betöltéséhez.

Az **Accu-Chek Active vércukormérő** és **Accu-Chek Instant vércukormérő készülékek** esetében az adatátvitel közvetlenül egy **USB kábel**lel történik.

Az alábbi **oktatóvideók** segítségével lehetnek az Accu-Chek Smart Pix készülékkel történő adatleolvasáshoz:

2.-4. lépés (0:35 mp-től):

- **Accu-Chek Performa vércukormérő adatbeolvasása az Accu-Chek Smart Pix adatleolvasó készülékkel**
<https://www.youtube.com/watch?v=QUaAUsgPjxk&feature=youtu.be>

2.-6. lépés (0:35 mp-től):

- **Accu-Chek Performa Combo vércukormérő és Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa adatbeolvasása az Accu-Chek Smart Pix adatleolvasó készülékkel**
<https://www.youtube.com/watch?v=ZbUFbDBfrgg&feature=youtu.be>

További segítséget talál az elektronikus adatmegosztással kapcsolatban:

<https://www.vercukormeres.hu/accu-chek-connect-online/>

FELHÍVJUK TOVÁBBÁ FIGYELMÉT INTERAKTÍV DIABÉTESZ EDUKÁCIÓ SOROZATUNKRA, AMELYET A WWW.DIABETESEDUKACIO.HU WEBOLDALON ÉRNET EL.

Szélesítse ismereteit a cukorbetegséggel és az étrendi kezeléssel kapcsolatban, diabétesze hatékonyabb önmenedzselése érdekében! A tréning segítségével **otthonában is mozoghat**, gyógytornász szakértőnk tanácsai alapján!

Inzulinpumpájával kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, keresse a területileg illetékes inzulinpumpa szaktanácsadóját, vagy hívja ingyenes zöldsámunkat: **06 80 200-694**

Köszönjük együttműködését!

Üdvözlettel:

Roche Diabétesz Üzletág

Roche Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 1.

ACCU-CHEK®